

FACE SHIELD



CA: Não Aplicável

**Dentro das especificações da:
ANVISA RDC 356 de 23.03.2020**

Norma: Não Aplicável

Aprovado para: Proteger a face do usuário contra respingos frontais de partículas não densas. É um produto para proteção adicional para profissionais da área da saúde, higiene e limpeza e atendimento ao público.

Descrição: Face Shield com testeira em PEAD, viseira de PETG transparente com espessura de 0.5 mm e área do visor de 270x245 mm que cobre toda área da face e parte do pescoço, também contém um elástico regulável com 20mm de largura, isento de partes metálicas e tira o suor para conforto do usuário, dentro das especificações da ANVISA RDC 356 de 23.03.2020.

Vida útil: Após aberta a embalagem, a vida útil máxima deste protetor facial é de 30 dias, considerando-se o uso contínuo em uma jornada média de trabalho de 8 horas; podendo diminuir devido as condições do ambiente de trabalho e da higienização / cuidados pelo usuário.

Atenção: Estes protetores deverão ser antecipadamente substituídos por sofrerem influência do ambiente e da atividade do trabalho, mesmo que não tenham atingido sua vida útil máxima. A substituição deve ser feita sempre que se apresentarem deformados, quebrados, rasgados, endurecidos ou com alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez original. Qualquer irritação ou alergia, deve cessar o uso do equipamento, e consultar o técnico de segurança de trabalho da empresa, ou o responsável pela saúde qualificado.

Prazo de validade: Indeterminado.

Marcações: Não Aplicável.

Armazenagem, limpeza e transporte: Para uma maior durabilidade, lavar o viseira com água e sabão neutro e enxugá-lo com lenço de papel. Procurar manter os protetores faciais em local seco, limpo e na embalagem original, evitando exposição a contaminantes.

Embalagem Unitária:

Embalagem de saco plástico impressa contendo 01 face shield.

Peso Aproximado:

100gr

Modo de Uso:

- 1** **Retire a película de um dos lados da viseira**
- 2** **Encaixe a viseira com o lado sem a película voltada para a parte interna da testeira começando dos furos centrais e terminando nas extremidades.**
- 3** **Encaixe o elástico em um dos pinos de fixação, ajuste o comprimento do elástico e fixe um dos furos no outro pino de fixação.**
- 4** **Retire a película protetora da tira de suor e cole a mesma na testeira.**
- 5** **Retire a película do lado externo da viseira e o produto estará pronto para uso.**

FACE SHIELD

FACE SHIELD

FACE SHIELD



Entre em contato e saiba mais

☎ 11 5510-5050

✉ contato@dystray.com.br

🌐 www.dystray.com.br

