


## CINTA ERGONÔMICA - DYSTRAY SOFT

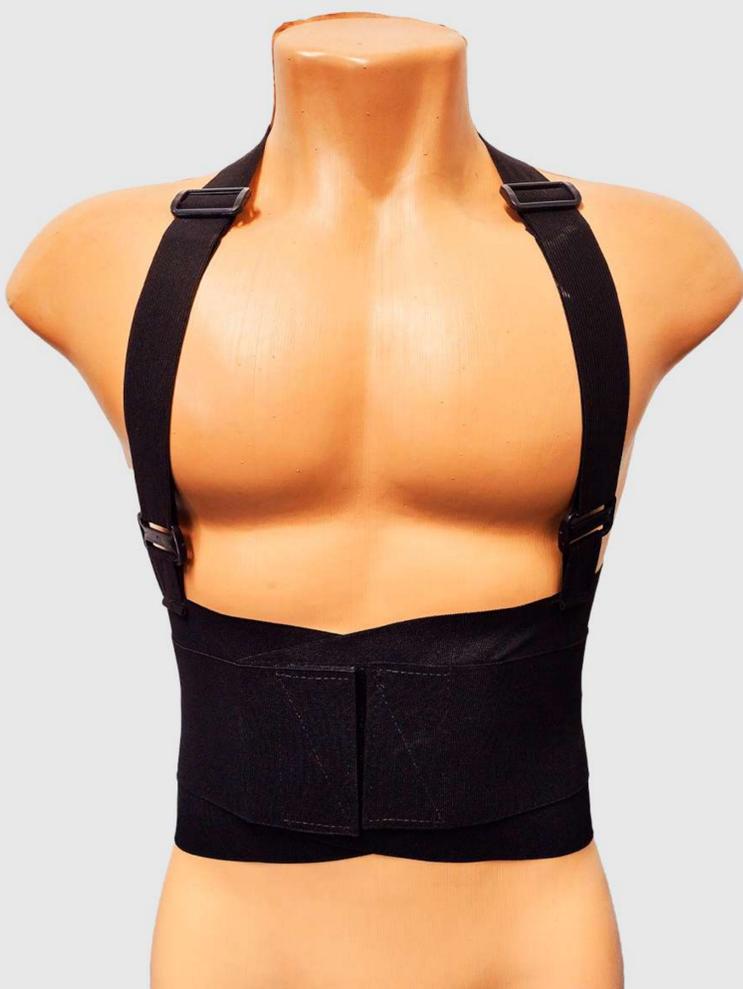

**CA: Não Aplicável**

**Classificação Fiscal: 62129000**

**Norma: Não Aplicável**

**Aprovado para:** Prevenção de lesões na região lombar causadas pelo excesso de carga na musculatura das costas e abdômen, proporciona correção da postura cervical e maior firmeza ao realizar movimentos de flexão e de carregamento de peso.

**Descrição:** Cinto Ergonômico em tecido de algodão e elástico com 20cm de largura na base, com suspensórios em elásticos e ajustáveis com passadores.

Faixas laterais em elásticos simples, com fechamento ajustável em velcro. Dispositivos plásticos antiderrapantes dispostos adequadamente no dorso. Disponível nos tamanhos P, M, G e XG.

**Vida útil:** Após aberta a embalagem, a vida útil do produto irá depender das condições do ambiente de trabalho e higienização.

**Atenção:** As dimensões e os pesos estão sujeitos a pequenas alterações em razão das características do material e processo.

Este cinto ergonômico deverá ser antecipadamente substituído por sofrer influência do ambiente e da atividade do trabalho, mesmo que não tenha atingido sua vida útil máxima. A substituição deve ser feita sempre que se apresentar deformação, quebra, rasgo, endurecido ou com alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez original, etc. Qualquer irritação ou alergia, deve cessar o uso do equipamento, e consultar o técnico de segurança de trabalho da empresa, ou o responsável pela saúde qualificado.

**Prazo de validade:** Indeterminado.

**Marcações:** Não Aplicável

**Armazenagem, limpeza e transporte:** Lavar com água e sabão neutro. Secar á sombra, em ambiente arejado. Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção etc.

**Cuidados:** Não lave o equipamento em máquinas de lavar. Lave manualmente em água fria utilizando detergente neutro.

### **Embalagem Unitária:**

**Embalagem de saco plástico impressa contendo 01 Cinta ergonômica.**

### **Peso Aproximado:**

**250gr**

## **Modo de Uso:**

- 1** **Coloque o suspensório entre os braços**
- 2** **Faça o fechamento da cinta na parte abdominal com o primeiro velcro**
- 3** **Faça o ajuste da faixa de ativação**
- 4** **Faça o ajuste do suspensório**

# CINTA **ERGONÔMICA**

## **DYSTRAY SOFT**

DYSTRAY SOFT

DYSTRAY SOFT



Entre em contato e saiba mais

☎ 11 5510-5050

✉ [contato@dystray.com.br](mailto:contato@dystray.com.br)

🌐 [www.dystray.com.br](http://www.dystray.com.br)

